



LagoMedical GmbH

Scarban®

Traitement professionnel des cicatrices



Car chaque cicatrice a besoin de soins!

Scarban.eu

Scarban®
Professional Scar Treatment

Because every scar needs care!

Silicone sheets LIGHT

- Prevents and reduces scarring
- Smooths the scar
- Clinically proven
- Washable
- Very high UV protection



UV PROTECTION



WWW.SCARBAN.EU



Film en silicone Scarban Light

- Fine et souple, idéale pour les peaux sensibles
- Convient aux plis cutanés et aux articulations Offre une protection contre les UV
- Facile à laver
- Disponible en différentes tailles



AVEC LE
SAVON
NETTOYANT

Les cicatrices défigurent votre peau

Les cicatrices apparaissent à la suite d'opérations, de brûlures et d'autres accidents entraînant une perte de tissu. Plus la plaie est grave, plus le risque de cicatrice (importante) est élevé. Il est important de prévenir ou de minimiser autant que possible le risque de cicatrices anormales et épaissies. C'est exactement ce que vous offrent les films médicaux en silicone et le gel de silicone de Scarban!

Des résultats rapides avec Scarban

Scarban a été développé en collaboration avec différents hôpitaux universitaires aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France.

En principe, toute cicatrice (indépendamment de sa cause, de son emplacement ou de sa taille) peut être traitée avec Scarban. Afin de minimiser les désagréments et les cicatrices anormales (c'est-à-dire les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes), commencez le traitement immédiatement après la fermeture de la plaie.⁴

Scarban®
Professional Scar Treatment

Because every scar needs care!

Silicone sheets ELASTIC

- Prevents and reduces scarring
- Smooths the scar
- Clinically proven
- Washable
- Very high UV protection



WWW.SCARBAN.EU

Film élastique en silicone Scarban

- Traitement intensif – très efficace pour les petites et grandes zones cutanées, offre une protection contre les UV
- Facile à laver
- Feuilles préformées de différentes tailles pour la chirurgie plastique et esthétique (poitrine/mamelon/abdomen/visage/mains).



AVEC LE
SAVON
NETTOYANT

Une cicatrisation rapide signifie que votre cicatrice :

- sera moins épaisse
- plus souple
- sera moins rouge

Préformés pour une utilisation aisée

Les mains et les doigts sont sans doute les zones les plus difficiles à traiter correctement. C'est pourquoi nous avons développé la gamme Scarban pour les mains et les doigts. Ces produits spécialement préformés facilitent considérablement le traitement des cicatrices dans ces zones. Il existe également des pansements préformés spécifiques pour le ventre et la poitrine, ainsi que pour le visage (nez, bouche et front).

Les plus utilisés par les professionnels

Les films en silicone sont les plus couramment utilisés par les professionnels dans le domaine des soins des cicatrices.



Gel de silicone Scarban Velvet Touch

- Traitement transparent des cicatrices – sèche rapidement
- Pour les petites cicatrices (chirurgicales) situées à des endroits visibles tels que le cou et le visage
- Convient pour une application sous une crème pour le visage et sous le maquillage
- Flacon pratique de 15 ml avec pompe doseuse
- Effet longue durée (à appliquer deux fois par jour)

Feuilles de silicone Scarban :

- Restent bien en place malgré les mouvements du corps, même lorsqu'elles sont appliquées sur des plis cutanés.
- Toucher doux et agréable grâce à leur matériau unique et à leur couche de finition.
- Fabriqués à partir de silicone 100 % médical, avec protection UV.

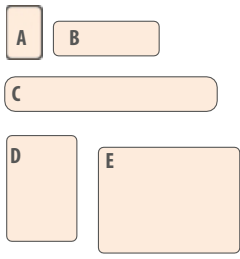
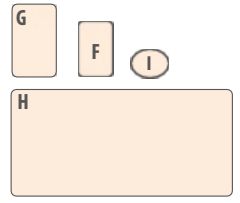
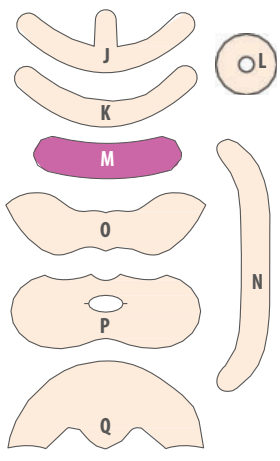
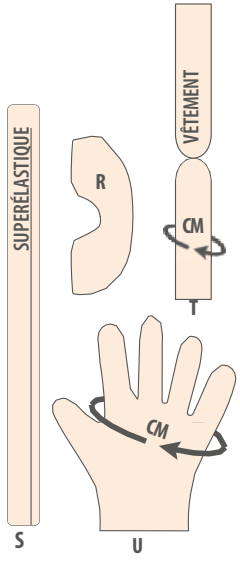
Protègent les cicatrices contre les rayons UV

La peau sensible et cicatrisée doit être protégée contre les rayons UV nocifs du soleil. En effet, les rayons UV peuvent être suffisamment puissants pour causer des dommages, même lorsque le soleil ne brille pas. Cela entraîne un risque de sécheresse cutanée, de formation de cicatrices, de décoloration permanente de la peau et de cancer de la peau.

Les films en silicone Scarban offrent une protection contre les rayons UV nocifs. Cela ne signifie toutefois pas que vous devriez exposer votre peau cicatrisée au soleil. **Il est recommandé d'éviter autant que possible l'exposition au soleil!**

La gamme de produits Scarban

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents produits Scarban.

Scarban®		Référence produit	Produit/Taille	PIÈCE AHL PRO EMBALLAGE
GEL	Velvet Touch Gel	4103015	Flacon pompe airless de 15	1
LIGHT		48057523	A 5 × 7,5 cm	2
		48051523	B 5 × 15 cm	2
		48053023	C 5 x 30 cm	2
		48101523	D 10 x 15 cm	2
		48152023	E 15 x 20 cm	2
CAOUTCHOUC – PRÉFORMÉ		47101513	F 10 x 15 cm	1
		47152013	G 15 x 20 cm	1
		47306013	H 30 x 60 cm	1
		47300643	I 4 x 3 cm (oval)	4
		47300223	J Lifting des seins L	2 (1 paire)
		47300123	K Poitrine	2 (1 paire)
		47300523	L aréole	2 (1 paire)
		47300713	M Césarienne	1
		47300413	N Abdominale	1
		47300913	N Abdomen XXL	1
		47002013	O Nez	1
		47001013	P Bouche	1
		47003013	Q Front	1
		47130043	R Espace web 10,5 × 4 cm	4
		48150043	S Bandeau pour les doigts 30 x 2,5 cm	4
		44140143	T Doigtiers S (5,5 cm)	4
		44140243	T Embouts pour doigts M (6,5 cm)	4
		44140343	T Embouts pour doigts L (7,5 cm)	4
		44140443	T Embouts de doigts XL (8,5 cm)	4
		4416013	U Taille de main S (18–19 cm)	1
		4416023	U Main M (20–21 cm)	1
		4416033	U Main L (22–23 cm)	1
		4416043	U Main XL (> 24 cm)	1

Effet scientifiquement prouvé

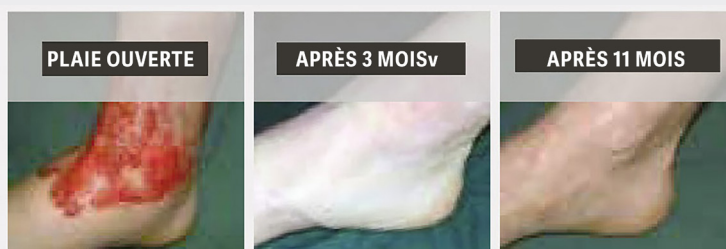
L'efficacité du silicone médical sur les cicatrices est scientifiquement prouvée. Le film en silicone recouvre la peau sensible et cicatrisée, ce qui lui permet de perdre moins d'humidité. La cicatrice est ainsi apaisée, ce qui favorise une récupération plus rapide de la peau. L'utilisation de films en silicone médical est donc devenue le traitement de choix dans le domaine des soins professionnels des cicatrices. ⁽¹⁻³⁾

Résultats du traitement des cicatrices avec Scarban

Brûlure au pied

- Homme
- 35 ans
- Accident de voiture


Après la fermeture de la plaie:
films de silicone + pansement compressif



Cicatrice hypertrophique due à une inflammation après l'opération

- Femme
- 35 ans
- Chirurgie abdominale

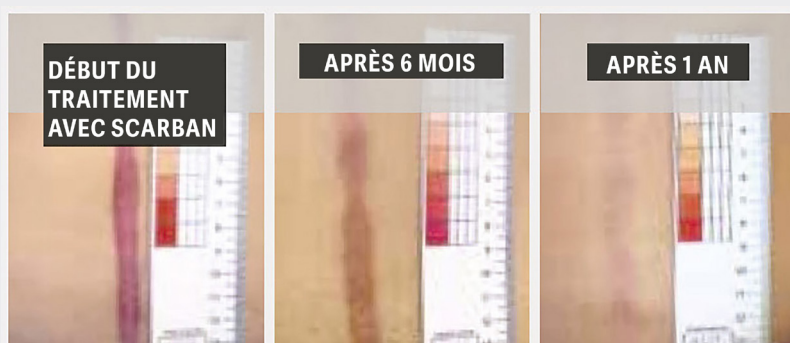Après la suture: films en silicone



Références bibliographiques :

- 1) Monstrey S. et al. Lignes directrices pratiques actualisées sur le traitement des cicatrices : mesures non invasives et invasives. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2014.
- 2) Meaume S. et al. Traitement des cicatrices : recommandations pratiques actualisées et utilisation des produits à base de silicone. European Journal of Dermatology, 2014.
- 3) Mustoe TA et al. Recommandations cliniques internationales sur le traitement des cicatrices. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2002.
- 4) Niessen F. et al. Utilisation topique de films de silicone dans le traitement des cicatrices hypertrophiques et des chéloïdes. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2016.

Types de cicatrices

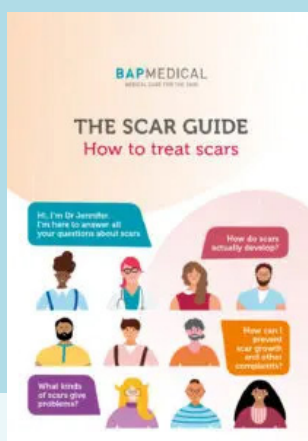
Une cicatrice normale peut, au début, présenter une légère rougeur, provoquer des démangeaisons, parfois être douloureuse et/ou donner une sensation de « raideur ». La cicatrice n'est pas épaissie et reste dans les limites de la plaie d'origine.



Une cicatrice hypertrophique est source de gêne. Elle est en relief, d'un rouge vif, douloureuse et souvent sèche ; elle peut provoquer de fortes démangeaisons et donner une sensation de « raideur ». La cicatrice peut également devenir épaisse et rigide.



Une cicatrice chéloïde est extrêmement épaisse et s'étend bien au-delà des bords de la plaie d'origine. Elle est d'un rouge vif tirant sur le violet et provoque des gênes de plus en plus importantes.



GUIDE GRATUIT

Guide sur les cicatrices

Scannez le code QR si vous souhaitez en savoir plus sur les cicatrices.

Élaboré en collaboration avec des médecins spécialistes, ce guide sur les cicatrices répond à de nombreuses questions :

- Comment se forme une cicatrice ?
- Quels sont les différents types de cicatrices ?
- Comment puis-je prévenir la formation de cicatrices ?
- Comment prévenir les problèmes liés aux cicatrices ?



Foire aux questions sur Scarban

Comment utiliser les produits Scarban ?

Chaque produit Scarban est accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de Scarban.

Puis-je acheter Scarban en ligne ?

Oui. Scarban est également disponible sur www.scarban.eu.

Comment nettoyer les alèses en silicone Scarban ?

Pour un nettoyage adéquat, un savon nettoyant spécial est fourni avec les draps. La douche est également un bon moment pour nettoyer les draps.

À partir de quand puis-je utiliser Scarban ?

Vous pouvez commencer à utiliser Scarban dès que la plaie est complètement cicatrisée.

En combien de temps Scarban agit-il ?

Les effets des produits Scarban se font rapidement sentir. Les symptômes tels que les démangeaisons et les douleurs peuvent être soulagés, voire disparaître complètement, en l'espace de quelques jours. Des résultats visibles apparaissent au bout de 2 à 4 mois environ.

Scarban est-il également efficace sur les cicatrices anciennes ?

Oui. Scarban agit aussi bien sur les cicatrices anciennes que sur les cicatrices récentes.

Pendant combien de temps dois-je utiliser Scarban ?

Utilisez Scarban tant que la cicatrice est en relief, rougie ou qu'elle provoque des gênes. Discutez de la durée du traitement avec votre médecin.

Les films en silicone Scarban ont-ils des effets secondaires ?

Aucun effet secondaire n'est connu à ce jour.



LagoMedical GmbH

DISTRIBUTION

Suisse et Principauté du Liechtenstein

LAGOMEDICAL GMBH

Seepark 1 | 9422 Staad | Suisse

T +41 81 515 29 40

office@lagomedical.ch

www.lagomedical.ch