



LagoMedical GmbH

Scarban®

Professional Scar Treatment



Denn jede Narbe braucht Pflege!

Scarban.eu

Scarban®
Professional Scar Treatment

Because every scar needs care!

Silicone sheets LIGHT

- Prevents and reduces scarring
- Smooths the scar
- Clinically proven
- Washable
- Very high UV protection



UV PROTECTION



WWW.SCARBAN.EU



Scarban Light Silikonfolie

- Dünn und flexibel Ideal für empfindliche Haut
- Geeignet für Hautfalten und Gelenke Bietet UV-Schutz
- Leicht zu waschen
- In verschiedenen Grössen erhältlich



MIT
CLEANING
SOAP

Narben verunstalten Ihre Haut

Narben entstehen nach Operationen, Verbrennungen und anderen Unfällen, bei denen Gewebe verloren geht. Je schwerer die Wunde ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer (grossen) Narbe. Es ist wichtig, das Risiko für abnormale, verdickte Narben so weit wie möglich zu verhindern oder zu minimieren. Genau das leisten die medizinischen Silikonfolien und das Silikongel von Scarban für Sie!

Schnelle Ergebnisse mit Scarban

Scarban wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitätskliniken in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Frankreich entwickelt.

Grundsätzlich kann jede Narbe (unabhängig von Ursache, Lage oder Grösse) mit Scarban behandelt werden. Um Beschwerden und abnormale Narben (d. h. hypertrophe Narben oder Keloidnarben) zu minimieren, sollten Sie die Narbenbehandlung unmittelbar nach dem Wundverschluss beginnen.⁴

Scarban®
Professional Scar Treatment

Because every scar needs care!

Silicone sheets ELASTIC

- Prevents and reduces scarring
- Smooths the scar
- Clinically proven
- Washable
- Very high UV protection



WWW.SCARBAN.EU



Scarban Elastische Silikonfolie

- Intensivtherapie – hochwirksam für kleine und grosse Hautpartien bietet UV-Schutz
- Leicht zu waschen
- Vorgeformte Folien in verschiedenen Grössen für die plastische und ästhetische Chirurgie (Brust/Brustwarze/Bauch/Gesicht/Hände).



MIT
CLEANING
SOAP

Eine schnelle Heilung bedeutet, dass Ihre Narbe:

- weniger dick
- geschmeidiger
- weniger gerötet

Vorgeformt für eine bequeme Anwendung

Hände und Finger sind wahrscheinlich die schwierigsten Stellen für eine richtige Narbenpflege. Deshalb haben wir die Scarban Hand & Finger-Produktreihe entwickelt. Diese speziell vorgeformten Produkte erleichtern die richtige Behandlung von Narben in diesen Bereichen erheblich. Ausserdem gibt es spezielle, vorgeformte Narbenpflaster für den Bauch-und Brustbereich sowie für das Gesicht (Nase, Mund und Stirn).

Von Fachleuten am häufigsten verwendet

Silikonfolien werden am häufigsten von Fachleuten in der Narbenpflege verwendet.



Scarban Velvet Touch Silikongel

- Transparente Narbenbehandlung – trocknet schnell
- Für kleine (operative) Narben an sichtbaren Stellen wie Hals und Gesicht
- Geeignet zur Anwendung unter Gesichtscreme und Make-up
- Praktischer 15-ml-Behälter mit Dosierpumpe
- Lang anhaltende Wirkung (zweimal täglich auftragen)

Scarban-Silikonfolien:

- Bleiben trotz Körperbewegungen sicher an Ort und Stelle, selbst wenn sie auf Hautfalten aufgebracht werden.
- Fühlt sich dank des einzigartigen Materials und der Deckschicht weich und angenehm an.
- Hergestellt aus 100 % medizinischem Silikon, mit UV-Schutz.

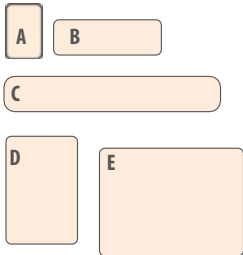
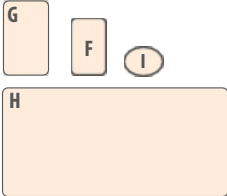
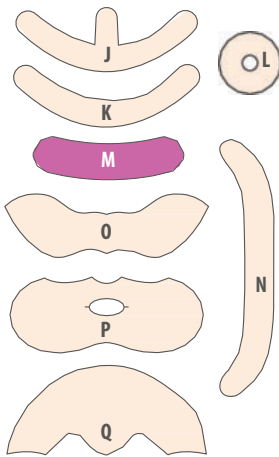
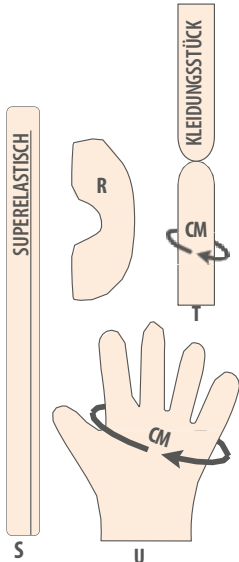
Schützt Narben vor UV-Strahlen

Empfindliche, vernarbte Haut muss vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne geschützt werden. Tatsächlich können UV-Strahlen stark genug sein, um Schäden zu verursachen, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Dadurch besteht das Risiko von trockener Haut, Narbenbildung, dauerhaften Hautverfärbungen und Hautkrebs.

Scarban-Silikonfolien bieten Schutz vor schädlichen UV-Strahlen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie vernarbte Haut bräunen sollten. **Es wird empfohlen, die Sonne so weit wie möglich zu meiden!**

Die Scarban-Produktlinie

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Scarban-Produkte.

Scarban®		Produktcode	Produkt/Grösse	Stück AHL PRO Packung
GEL	Velvet Touch Gel	4103015	15 ml Airless-Pumpe	1
LIGHT		48057523	A 5 × 7,5 cm	2
		48051523	B 5 × 15 cm	2
		48053023	C 5 x 30 cm	2
		48101523	D 10 x 15 cm	2
		48152023	E 15 x 20 cm	2
GUMMI – VORGEFORMT		47101513	F 10 x 15 cm	1
		47152013	G 15 x 20 cm	1
		47306013	H 30 x 60 cm	1
		47300643	I 4 x 3 cm (oval)	4
		47300223	J Bruststraffung L	2 (1 Paar)
		47300123	K Brust	2 (1 Paar)
		47300523	L Brustwarzenhof	2 (1 Paar)
		47300713	M Kaiserschnitt	1
		47300413	N Abdominal	1
		47300913	N Bauch XXL	1
		47002013	O Nase	1
		47001013	P Mund	1
		47003013	Q Stirn	1
		47130043	R Webspacer 10,5 × 4 cm	4
		48150043	S Fingerwickel 30 x 2,5 cm	4
		44140143	T Fingerkappen S (5,5 cm)	4
		44140243	T Fingerkappen M (6,5 cm)	4
		44140343	T Fingerkappen L (7,5 cm)	4
		44140443	T Fingerkappen XL (8,5 cm)	4
		4416013	U Handgröße S (18–19 cm)	1
		4416023	U Hand M (20–21 cm)	1
		4416033	U Hand L (22–23 cm)	1
		4416043	U Hand XL (> 24 cm)	1

Wissenschaftlich belegt

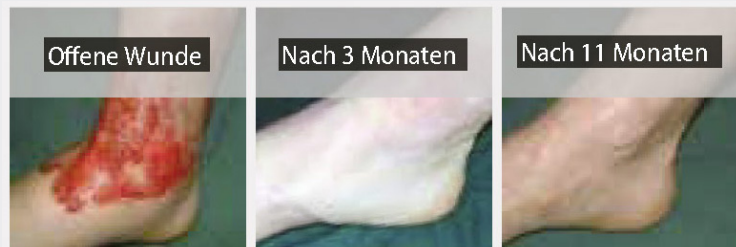
Die Wirkung von medizinischem Silikon auf Narben ist wissenschaftlich belegt. Die Silikonfolie bedeckt die empfindliche, vernarbte Haut, sodass diese weniger Feuchtigkeit verliert. Die Narbe wird dadurch beruhigt, wodurch sich die Haut schneller erholen kann. Die Verwendung von medizinischen Silikonfolien hat sich daher zur Therapie der Wahl in der professionellen Narbenpflege entwickelt.¹⁻³

Ergebnisse der Scarban-Narbenbehandlung

Verbrennung am Fuss

- Mann
- 35 Jahre
- Autounfall


Nach dem Wundverschluss:
Silikonfolien + Kompressionsverband



Hypertrophe Narbe aufgrund einer Entzündung nach der Operation

- Weiblich
- 35 Jahre
- Bauchoperation

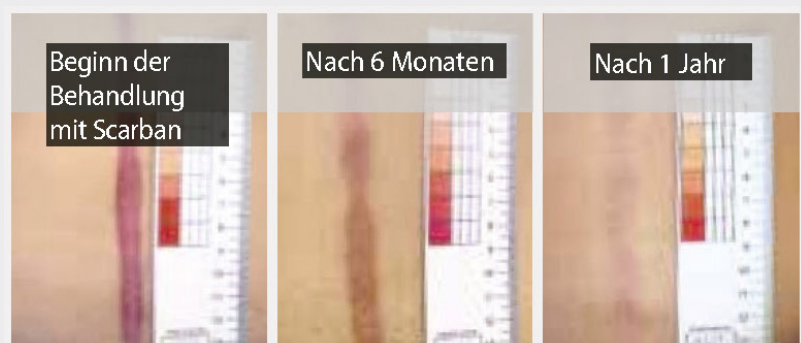Nach dem Wundverschluss:
Silikonfolien



Literaturhinweise:

- 1) Monstrey S. et al. Aktualisierte praktische Leitlinien zur Narbenbehandlung: Nichtinvasive und invasive Massnahmen. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2014.
- 2) Meaume S, et al. Behandlung von Narben: Aktualisierte praktische Leitlinien und Einsatz von Silikonprodukten. European Journal of Dermatology, 2014.
- 3) Mustoe TA et al. Internationale klinische Empfehlungen zur Narbenbehandlung. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2002.
- 4) Niessen F. et al. Topische Anwendung von Silikonfolien bei der Behandlung von hypertrophen Narben und Keloiden. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2016.

Arten von Narben

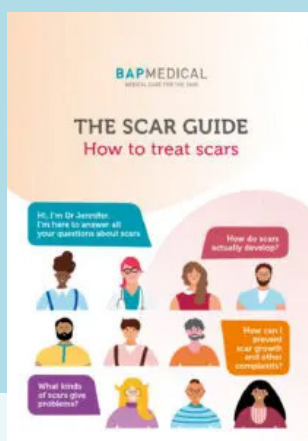
Eine normale Narbe kann anfangs etwas gerötet sein, jucken, manchmal schmerzen und/oder sich „straff“ anfühlen. Die Narbe ist nicht verdickt und bleibt innerhalb der Ränder der ursprünglichen Wunde.



Eine hypertrophe Narbe verursacht Beschwerden. Sie ist erhaben, leuchtend rot, schmerzhaft und oft trocken – und kann extrem jucken und sich „straff“ anfühlen. Die Narbe kann zudem dick und steif werden.



Eine Keloidnarbe ist extrem dick und wächst weit über die Ränder der ursprünglichen Wunde hinaus. Die Narbe ist leuchtend rot/violett und verursacht zunehmend Beschwerden.



KOSTENLOSER Narbenratgeber

Scannen Sie den QR Code, wenn Sie mehr über Narben erfahren möchten.

Der in Zusammenarbeit mit Fachärzten entwickelte Narbenratgeber beantwortet eine Vielzahl von Fragen:

- Wie entsteht eine Narbe eigentlich?
- Welche Arten von Narben gibt es?
- Wie kann ich die Entstehung von Narben verhindern?
- Wie beuge ich Narbenbeschwerden vor?



Häufig gestellte Fragen zu Scarban

Wie verwende ich Scarban-Produkte?

Jedem Scarban-Produkt liegt eine ausführliche Gebrauchsanweisung bei. Darin finden Sie alles, was Sie über die Anwendung von Scarban wissen müssen.

Kann ich Scarban online kaufen?

Ja. Scarban ist auch unter www.scarban.eu erhältlich.

Wie reinige ich die Scarban-Silikonlaken?

Für die ordnungsgemässe Reinigung wird zusammen mit den Folien eine spezielle Reinigungsseife mitgeliefert. Auch das Duschen bietet eine gute Gelegenheit, die Folien zu reinigen.

Ab wann kann ich Scarban anwenden?

Sie können mit der Anwendung von Scarban beginnen, sobald die Wunde vollständig verheilt ist.

Wie schnell wirkt Scarban?

Die Wirkung der Scarban-Produkte ist schnell spürbar. Symptome wie Juckreiz und Schmerzen können innerhalb weniger Tage gelindert werden oder ganz verschwinden. Sichtbare Ergebnisse sind nach etwa 2 bis 4 Monaten zu erkennen.

Wirkt Scarban auch bei alten Narben?

Ja. Scarban wirkt sowohl bei alten als auch bei frischen Narben.

Wie lange sollte ich Scarban anwenden?

Verwenden Sie Scarban so lange, wie die Narbe erhaben oder gerötet ist oder Beschwerden verursacht. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Dauer der Behandlung.

Haben die Scarban-Silikonfolien Nebenwirkungen?

Derzeit sind keine Nebenwirkungen bekannt.



LagoMedical GmbH

VERTRIEB

Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

LAGOMEDICAL GMBH

Seepark 1 | 9422 Staad | Schweiz

T +41 81 515 29 40

office@lagomedical.ch

www.lagomedical.ch